


Différences entre les versions du logiciel 2.3 et 3.1 du *sleep•safe harmony*


2.3


3.1



Écran d'accueil

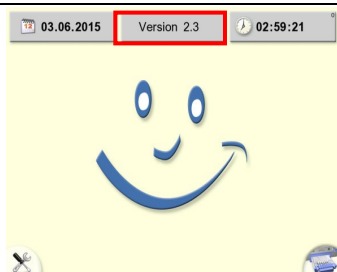


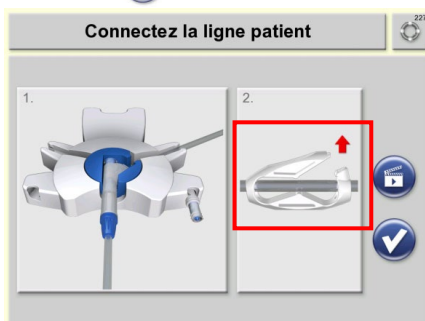
Connexion du patient

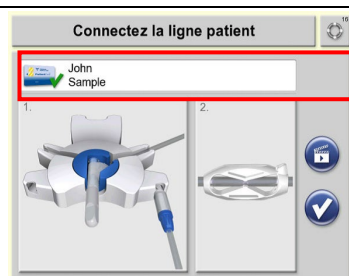


Confirmer la connexion avec la touche  pour débuter le traitement.

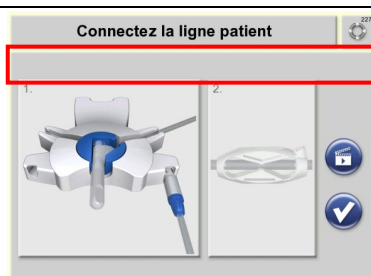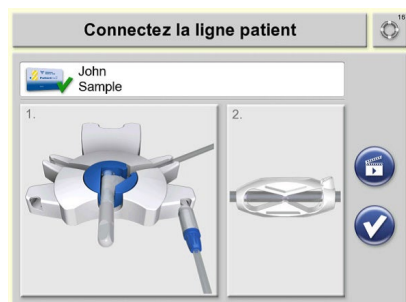

Appuyez  pour confirmer la connexion.




Le nom du patient s'affichera à l'écran. Appuyez la touche externe  pour confirmer la connexion et débuter le traitement.

Confirmez l'identité du patient

John
Sample

Assurez-vous que le bon patient est connecté.


Appuyez sur le bouton externe
pour confirmer la connexion du patient.

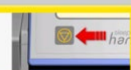


2.3

3.1

Options de traitement pendant le traitement


Options de traitement confirmées avec 




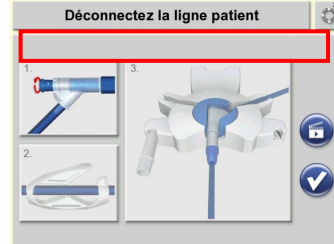
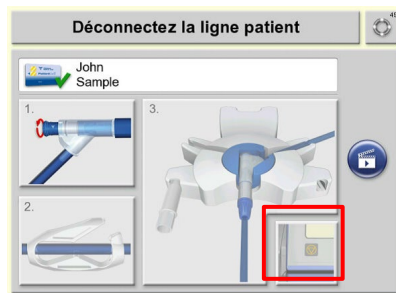
Options de traitement confirmées avec la touche externe .




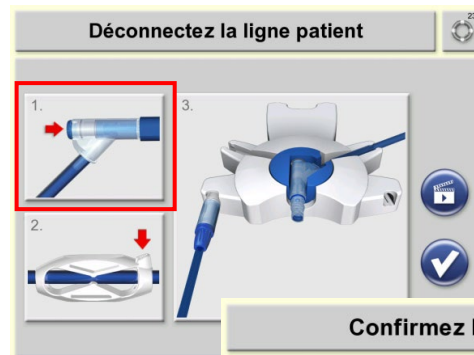
Déconnexion du patient

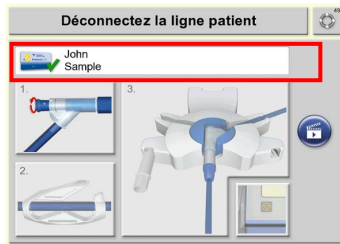

Appuyez la touche externe  pour confirmer la déconnexion.



Appuyez  pour confirmer que toutes les étapes de déconnexion ont été correctement effectuées.



Appuyez la touche externe  pour confirmer la déconnexion.

Confirmez la déconnexion

Assurez-vous que toutes les étapes de la déconnexion sont effectuées correctement.

Appuyez sur le bouton externe pour confirmer la déconnexion du patient.

Résultats du traitement

| Fin du traitement | | |
|---|-------------|--------------------------------|
|  | 20,5 l | Volume du traitement |
|  | -1835 ml | Bilan des entrées-sorties |
|  | 07 h 25 min | Durée du traitement |
|  | 4 | Interruptions |
|  | 22 min | Réduction du temps de stase |
|  | 113 ml | Réduction du volume d'infusion |

Thérapie

Fin du traitement

| | Réalisé | Prescrit |
|---|-------------|------------|
|  | 10,0 l | 10,0 l |
|  | 08 h 32 min | 8 h 24 min |
|  | -772 ml | --- |
|  | 190 ml | --- |
|  | 3 | --- |

Appuyez sur la touche externe pour valider les données du traitement !